

No dejes que tu impresora determine el tamaño de su preservativo. Imprima esta página asegurándose que el ajuste "ajuste de página" esté desactivado.



# EL ANCHO IMPORTA:

Elige tu preservativo perfecto entre uno de nuestros siete tamaños, para que no sientas el condón, sino solo lo que realmente quieres sentir. Por supuesto, nuestros condones se prueban individualmente de acuerdo con estándares estrictos, son veganos y están hechos de goma. Sellados y lubricados.

# 1

## ¡PONLA DURA!

Una erección decente es importante para que el condón se asiente correctamente.

# 2

## ¡MIDE CON PRECISIÓN! ¡FELICIDADES!

Envuelve el medidor de pene Loovara recortado alrededor de la parte más gruesa de tu pene. No demasiado apretado y no demasiado flojo.

# 3

Vualá! Simplemente lee tu recomendación de tamaño en la cinta métrica y recuerda qué animal eres.

69 MOOSE

64 BUFFALO

60 BEAR

57 WOLF

53 FOX

49 RACCOON

47 EAGLE




47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69

# CÓMO PONER LA CINTA MÉTRICA:



EN ESTE EJEMPLO, EL TAMAÑO DEL PENE ES: 53 = FOX.

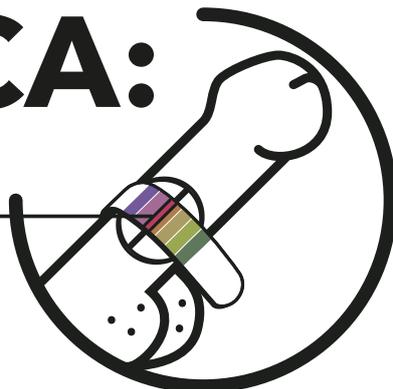

PRESERVATIVOS PARA TU TALLA

TU TALLA ES:  
MEDIDOR



TU TALLA ES:  
MEDIDOR

COLOQUE EL LOGOTIPO EN EL CENTRO DEL PENE Y COLOQUE LA CINTA A SU ALREDEDOR.